

ardo bellis

DIE ERSTE KLEINE UND
MOBILE MILCHPUMPE MIT
KRANKENHAUSQUALITÄT



Art.Nr. 63.00.522

DIE PERSÖNLICHE NICU-MILCHPUMPE

Erleichtert das Einhalten der Leitsätze zur Laktationsförderung

Ardo Bellis ist die erste mobile Milchpumpe mit Akku für die Verwendung in Kliniken und vereinfacht das Einhalten der Leitsätze zur Laktationsförderung. Der geringe Preis ermöglicht die Anschaffung einer Milchpumpe für jedes NICU Bett, so dass jede Mutter während ihres stationären Aufenthaltes eine persönliche Milchpumpe für sich hat.

Leitsatz Laktationsförderung¹:

- Beginn des regelmäßigen doppel-seitigen Pumpens 3 bis 6 Stunden pp
- 8–12 mal Abpumpen innerhalb von 24 Stunden
- Pumpen am Behandlungsplatz des Kindes auf der NICU
- Geschützte Intimsphäre beim Pumpen und Haut-zu-Hautkontakt

Vorteile Bellis Milchpumpe

- Mutter hat Bellis als persönliche Pumpe stets verfügbar
- Verfügbarkeit erleichtert häufiges Abpumpen
- Leicht ans Bett des Kindes transportierbar & unabhängig von Steckdose
- Erleichtert das Abpumpen im Bett der Mutter beim Kuscheln oder Bonding

Weitere Vorteile von Ardo Bellis für die Anwenderinnen

- Einfach bedienbare 2-Phasen-Milchpumpe mit Stimulations- und Abpumpmodus
- Sanftes und effizientes Abpumpen dank individueller Einstellungen in beiden Phasen
- Benutzerfreundlichkeit durch Speicherung des gesamten individuellen Abpumpverlaufs (Abpumpdauer und -Einstellungen)
- Power Pumping-Funktion ermöglicht Intervallpumpen auf einen Tastendruck

Fachpersonen empfehlen den Einsatz von Bellis als persönliche NICU Pumpe.²


Die Power Pumping Funktion

Als Power Pumping bezeichnet man Intervallpumpen, welches das Clusterfeeding imitiert und den Prolaktinspiegel erhöht (Prolaktin = milchbildendes Hormon). „Das >Power-Pumping< ist als zusätzliche Stimulation der Brust gedacht, wenn das Saugen des Kindes oder andere Pumpphasen mit der Milchpumpe die Milchproduktion nicht ausreichend aufbauen oder erhalten können.“³

Die Power Pumping Funktion der Bellis ist ein vordefiniertes einstündiges Intervallpumpen nach dem Schema:

- 20 Min. Abpumpen
- 10 Min. Pause
- 10 Min. Abpumpen
- 10 Min. Pause
- 10 Min. Abpumpen

Die Pumpe pausiert automatisch und erinnert nach der Pause mit einem Signalton ans Weiterpumpen. Sofern nicht durch eine Fachperson anders empfohlen, reicht eine Power Pumping Session täglich.

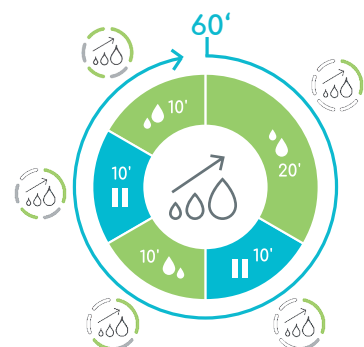

¹ „Leitsätze zur Ernährung von zu früh geborenen Kindern“ des Bundesverbandes Das frühgeborene Kind e.V.

² 4 von 4 Stillberaterinnen empfehlen Ardo Bellis nach mehrwöchigem Test uneingeschränkt für die Verwendung auf der Neo-Station

³ Elacto Handout Power Pumping 2016-4

FUNKTIONEN UND EIGENSCHAFTEN



- Memory-Funktion**
 - Speichert die persönlichen Einstellungen und den Abpumpverlauf
 - Automatische Wiederholung beim nächsten Abpumpen
 - Jederzeit anpassbar
- Mobil mit Akku**
 - Integrierter Akku für bis zu acht Abpump-Sessions
 - Kleiner, leichter Pumpenkörper
- Intuitive Bedienung**
 - Mit beleuchtetem Touch-Display
- Geräuscharm**
 - Keine Beeinträchtigung der anderen Patientinnen
- Power Pumping Funktion**
 - Vordefiniertes einstündiges Intervall-Pumpen
 - Pausiert automatisch und erinnert ans Weiterpumpen
- Personalisierbar**
 - Je 8 Levels Vakuum und Zyklus, in beiden Phasen individuell & unabhängig voneinander einstellbar
 - Für sanftes und effizientes Abpumpen
- 2-Phasen Milchpumpe**
 - Analog dem natürlichen Saugverhalten von Babys
 - Phase jederzeit manuell wechselbar, entsprechend dem Einsetzen des Milchspendereflezes

FÜR DIE NACHVERSORGUNG

Bellis & Alyssa – starkes Team für die Versorgung zuhause

Ardo Bellis eignet sich mit ihren herausragenden Funktionen und Eigenschaften auch hervorragend als Milchpumpe für die Vermietung (HMV-Nr. ab Q2/2024) oder zum Verleih als Notfall-Milchpumpe.

Desweiteren haben Mütter die Möglichkeit, sich die funktionsgleiche Milchpumpe Ardo Alyssa für den persönlichen Gebrauch zu besorgen. Alyssa lässt sich exakt gleich bedienen, bietet dieselben Funktionen und dieselbe Leistung wie Bellis. Alyssa ist jedoch kleiner und mobiler und lässt sich auch per App bedienen.



Ardo Alyssa Double

- Für den persönlichen Gebrauch
- Inkl. Standard-Pumpsets
- Kompatibel mit den Hands-Free Pumpsets



Ardo Alyssa Hands-Free

- Für den persönlichen Gebrauch
- Inkl. Hands-Free Pumpsets
- Kompatibel mit den Standard-Pumpsets für Alyssa/Bellis



Ardo Bellis

- Für mehrere Benutzerinnen
- Lieferung ohne Pumpsets
- Kompatibel mit Standard-Pumpsets & Hands-Free Pumpsets

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot und vereinbaren eine kostenlose Probestellung. Unseren Kundenservice erreichen Sie unter

08153 / 90 877 0 oder info@ardo.de