

KORREKT REINIGEN

LILYPADZ® SILIKON-STILLEINLAGEN

Erfahrungen haben gezeigt, dass die Reinigung der LilyPadz® oft mit handelsüblicher, flüssiger Handseife erfolgt. Da jedoch nahezu alle Flüssig(hand)seifen/Cremeseifen rückfettende Substanzen enthalten, sind diese für die Reinigung nicht optimal – auch wenn sie pH-neutral sind. Weshalb? Rückfettende Substanzen sind zwar gut für die Hände, vermindern jedoch die Haftbarkeit der LilyPadz® innert kurzer Zeit.

Um eine gute Haftung der Silikon-Stilleinlagen aufrechtzuerhalten, müssen die LilyPadz® nach jedem Gebrauch **mit heissem Wasser und einem fettlösendem, pH-neutralen Geschirrspülmittel** gereinigt werden. Das Geschirrspülmittel soll duftstofffrei oder zumindest duftneutral sein, damit das Baby die Brust nicht verweigert und dies zu einem Stillstreik führen kann. Gegebenenfalls ist bereits ein Baby-Spülmittel für Schnuller, Sauger und Flaschen im Einsatz, welches verwendet werden kann.

- Fettlösendes, duftstofffreies und pH-neutrales Geschirrspülmittel benutzen. Nicht ohne Geschirrspülmittel reinigen.
- Gut ausspülen und an der Luft trocknen lassen – nicht abtrocknen.
- Gelegentlich können die LilyPadz® auch ausgekocht werden (max. 1 Minute, ohne Schutzschalen). Häufiges Auskochen ist jedoch nicht notwendig und verkürzt die Lebensdauer des Produktes.
- Nicht in die Spülmaschine oder Mikrowelle geben.

Bei sachgemäßer Pflege können die LilyPadz® Stilleinlagen während mehreren Wochen verwendet werden.

